

VIKING

Quick guide (SE)



REHASENSE



	
1. Låsknappen och bärhandtag 2. Bromshandtag 3. Ratt för höjdställning av handtag 4. Väska med reflexdetaljer (tillbehör)	Utfällning av VIKING rollatorn 1. Tryck på den röda låsknappen 2. Fäll ut rollatorn genom att föra sittdelen utåt
	
Utfällning av VIKING rollatorn 1. Pressa utsidorna av sitsen ner mot kryssdelen tills sitsen låses i ramen	Höjdställning av VIKING handtag 1. Lossa rattan för höjdställning
	
Höjdställning av VIKING handtag 1. Ställ in handtaget i önskat läge genom att föra handtaget uppåt/neråt 2. Använd markeringarna och hålbilderna för att säkerställa inställningen 3. Dra åt rattan för höjdställningen	Rekommenderad höjd på handtaget Handtaget bör ställas in i samma höjd som handleden hos brukaren, då denne står med lätt böjd armbåge.



Aktiv inbromsning

1. Krama bromshandtaget för att sakta ned och stanna rollatorn



Parkeringsbroms

1. Pressa handtagen neråt tills de låser sig
2. Parkeringsbroms måste aktiveras om brukaren vill sätta sig på sitsen
3. Parkeringsbroms måste aktiveras vid uppresning till stående alt när brukaren ska sätta sig



Hoppfällning av VIKING

1. Lyft handtaget på sitsen rakt upp för att låsa upp rollatorn
2. För sidorna in mot varandra tills den röda låsknappen låst sig



Att bära VIKING

1. Lyft rollatorn via handtaget för att lyfta framhjulen. Detta för att underlätta att gå i trappan och/eller rulla rollatorn längs marken