

SERVICEMANUAL VIKING

Servicemanual (SE): VIKING



Servicemanual VIKING

1. Allmän information

Denna servicemanual innehåller information om livslängd, garanti, underhåll och tekniska data.

2. Produktens förväntade livslängd

Produktens förväntade livslängd är tio (10) år om den används i enlighet med säkerhetsinstruktionerna, underhållet och instruktionerna för korrekt användning. Produktens faktiska livslängd kan variera beroende på hur mycket och hur intensivt den används.

3. Garanti

Två års garanti lämnas från leveransdatum, om inte annat avtalats. Avvikelse kan förekomma på grund av lokala bestämmelser. Skador pga normalt slitage samt skador orsakade av onormal användning (t.ex. överskridande av användarens maximala vikt) täcks inte av garantin.

Instruktionerna för underhåll och användning måste följas. Otillåten modifiering av produkten kommer att resultera i att garantin upphör att gälla.

4. Funktionskontroll och underhåll

- ✓ Kontrollera att hjul, kullager och gafflar fungerar som de ska, är fria från defekter, sitter fast ordentligt samt att inget hår, ludd eller smuts fastnat i hjulen
- ✓ Kontrollera att skruvarna och justeringarna är korrekt åtdragna
- ✓ Kontrollera att bromsarnas funktion, båda aktivt och i parkeringsläge, samt skick
- ✓ Kontrollera hop- och utfällning, att låsningsmekanismen fungerar och är fri från defekter
- ✓ Kontrollera att handtagen och handtagsprofilen sitter fast ordentligt, är fria från defekter samt att höjdjustering av körhandtagen fungerar
- ✓ Kontrollera att ramen är fri från defekter
- ✓ Kontrollera att sits och ryggband är ordentligt fastsatta och är fria från defekter
- ✓ Insmörjning av rörliga delar med kan göras emellanåt för att underhålla hjulen



Produkten måste rengöras och desinficeras noggrant före återanvändning.



En rollator med böjd/skev ram ska kasseras

5. Felsökning

<i>Problembeskrivning</i>	<i>Möjliga orsaker</i>	<i>Lösning</i>
Svårigheter att skjuta eller styra rollatorn	Det finns smuts mellan hjulen och gafflarna	Rengör mellan hjul och gaffel. Ta bort hjulet vid behov. Smörj rörliga delar med smörjolja.
Bromsarna fungerar inte som de ska eller olika på var sin sida.	Bromsbackarna är slitna eller bromsarna är inte korrekt justerade.	Prova att justera bromsvajern eller byt ut bromsbackarna. Om detta inte löser problemet, kontakta återförsäljaren.
Ramen låses inte korrekt vid hop- och/eller utfällning	Kontrollera om modellens låsmekanism eller mottagande del inte slitits ur eller är defekt. Kontrollera även att ramen inte är skev.	Byt ut slitna eller defekta delar. Om detta inte löser problemet, kontakta återförsäljaren.

6. Rengöring & desinfektion

- ✓ Rollatorn bör rengöras regelbundet/hållas i rent skick för bästa resultat
- ✓ Lättare smuts och damm kan avlägsnas med en fuktig trasa
- ✓ Hårdare smuts kan avlägsnas med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten
- ✓ Undvik slipmedel och/eller blekningsmedel
- ✓ Hjulen kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel
- ✓ Rollatorn tål att tvättas i tvättunnel/duschkabinett/diskdesinfektor max 80° i 10min
- ✓ Rollatorn kan ytdesinficeras med en mjuk trasa eller svamp och ett desinfektionsmedel som innehåller 70-80 % etanol. Vi avråder från desinfektionsmedel som innehåller klor eller fenol.

7. Kassation

När produkten inte längre kan användas ska den, dess tillbehör och förpackningsmaterial sorteras på rätt sätt. Rollatorn ska lämnas till en deponerings-/avfallsstation för återvinning.

Rehasense®

Tillverkare

Rehasense SP. S.O.O.
Sulejowska 45g
300 Piotrków Trybunalski
Poland

Rehasense Sverige
Polhemsgatan 28 97-
39239 KALMAR
Sweden