

PAWS mobilhållare



Monteringsanvisning (SE)




Artikelnummer:

EBH221



Monteringsanvisning

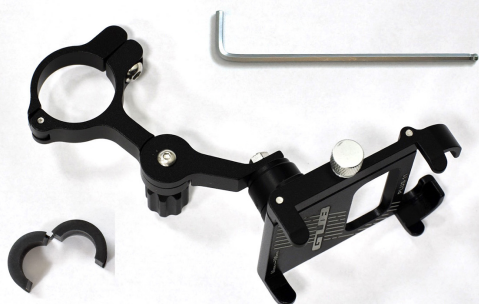

1. För montering behövs en 4 mm insexnyckel



2. Börja med att montera utfyllnadsringen på styret.



3. Trä på mobilhållaren över utfyllnadsringen.



4. Dra fast hållaren med en 4 mm insexnyckel.



5. Den större justeringsskruven används för att ställa in riktningen på mobilen. Den mindre breddjusteringsskruven justerar bredden efter den telefonmodell som används. Dra fast båda justeringsskruvarna när mobilen sitter i ditt valda läge.



6. Dra fast båda justeringsskruvarna när mobilen sitter i ditt valda läge.