

PAWS



REHASENSE

Utprovning och montering med Panthera



MONTERING AV RÖRSKYDD

Rörskydden är utvecklade tillsammans med Panthera och krävs vid användande av PAWS. De består av en delad hylsa med fyra tillhörande skruvar per skydd.



Skydden monteras där det finns en rak bit rör om minst 110 mm. Det enklaste är att montera dem direkt ovanför skruvskallen till justeringen av fotstödshöjden, detta för att slippa mätning. Om de av olika orsaker behöver justeras i höjdlängd ska de sättas på samma höjd. Notera att skruvskallarna **ska vara monterade framåt, inte i sidled.**

Korrekt



Inte korrekt



INSTÄLLNING AV PAWS

1. Ta loss en av griparmarna och justera gapet så att man kan fästa dem stadigt med låshandtaget. Greppen går att justera för rör mellan 19-32 mm och det görs genom att man skruvar in eller ut muttern på insidan av klämman med en 13 mm hylsa.



2. Gör om proceduren med den andra armen.
3. Montera ena klämmarmen i breddjusteringsstycket



4. Lossa alla tre justeringsskruvarna för höjd, rotation in-/ut samt vinkel med en 6 mm och 8 mm insexnyckel så att hela fastsättningsdelen är helt lös och flexibel.




5. Kör in rullstolen i gapet och hitta ett läge för att kunna låsa fast greppet runt benstödet (rörskyddet). När man kan låsa fast greppet innebär det att alla justeringsmått ligger rätt.



6. Med greppet fortfarande låst drar ni åt alla tre skruvarna för att låsa positionen. Sida ett är nu klar.
7. Koppla loss rullstolen och gör om proceduren på andra sidan.

8. Justera in bredden så att klämmorna har samma avstånd från centrumdelen på PAWS och lås med snabblåsen. Lås fast PAWS vid rullstolen, lossa skruven för låsringen på varje sida med en 4 mm insexnyckel.

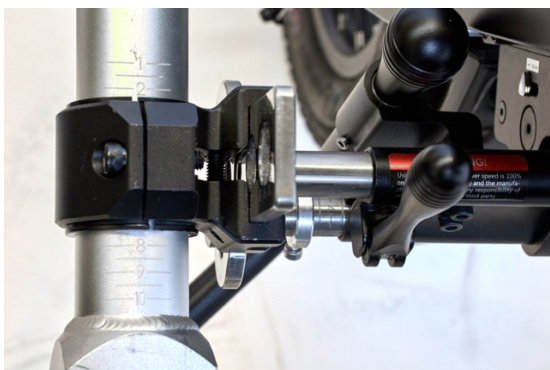

9. För in låsringarna mot centrumdelen på PAWS och lås fast dem. Detta innebär att hela fastsättningsenheten kommer att hamna i rätt läge när man t ex har tagit loss dem för att frakta PAWS i bilen.




10. När man är van tar monteringsprocessen max 10 minuter totalt.

Vilka delar ska vi använda vid order av en PAWS till Panthera?

De flesta stolar som kommer att användas vid utprovning antar vi kommer att vara någon av Pantheras modeller, t ex S2, S3, U2 eller U3 i modellerna standard, lång, light och Y- eller U-front. De delar som varierar enligt modell och sittbredd är följande:

Elektriska klämmor för PAWS med autofäste och -lyft

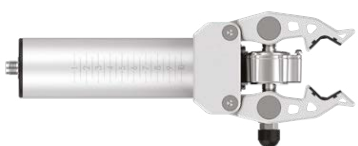	C-STD - Autoklämma - standard artikelnummer: Vänster: EBD01A-SI / Höger: EBD01B-SI
	C-STD - Autoklämma - LÅNG artikelnummer: Vänster: EBD02A-SI / Höger: EBD02B-SI
	C-70 - Autoklämma med 70 mm höga klämmor artikelnummer: Vänster: EBD05A-SI / Höger: EBD05B-SI

Manuella klämmor för PAWS med manuell fäste och -lyft

	C-STD - Manuell klämma med vertikalt handtag - standard Artikelnummer: Vänster: EBC00E-SL / Right: EBC00F-SL
	C-STD - Manuell klämma med vertikalt handtag - LÅNG , Artikelnummer: Vänster: EBC02J-SL / Höger: EBC02K-SL
	C-70 - Manuell klämma med vertikalt handtag och 70 mm klämmor - Artikelnummer: Vänster: EBC09E-SL / Höger: EBC09F-SL

Rörskydd för Panthera

	Rörskydd för Pantheras rullstolar Artikelnummer för 1 styck: EBC02N (x 2pcs)
---	--

Klämhållare för festsättningsklämmor

		Standard klämhållare – svart alu. Passar både klämversioner, manuella och automatiska klämmor Artikelnummer: Vänster: EBC11L / Höger: EBC11R
		Standard klämhållare med vinklad hylsa för mycket smalt framrörsavstånd, ner till 220 mm – svart alu. Passar både klämversioner, manuella och automatiska klämmor Artikelnummer: Vänster: EBC11M / Höger: EBC11N

Höjdställningsplattor

	Standard sidofäste för klämhållare Längd: 100 mm Artikelnummer: EBC035W
	Långt sidofäste för klämhållare Längd: 185 mm Artikelnummer: EBC055W

STYRSTÅNGSSTAG:

	Standardlängd: 180-215 mm Artikelnummer: EBH00G
	Längre version: 210-265 mm - Designad för användare som behöver flytta styret närmare sig Artikelnummer: EBH01G

Breddjustering:



70 mm breddjustering EBC070-BK (samma för båda sidor x2)
80 mm breddjustering EBC080-BK (samma för båda sidor x2)
107 mm breddjustering Vänster: EBC107L-BK / Höger: EBC107R-BK
150 mm breddjustering Vänster: EBC150L-BK / Höger: EBC150R-BK
190 mm breddjustering Vänster: EBC190L-BK / Höger: EBC190R-BK

Kombination av delar till respektive Pantherarullstol och brukare:

Front	Klämmor	Rörskydd
Standard	C-70	Måste
U-front	C-70	Måste
Y-front	C-std	Måste

Brukare längd	Klämmor	Styrstångstag
Kort	Normal	Lång
Normal	Normal	Normal
Lång	Lång	Normal

Hjulstorlek	Höjdinställningsplattor
24"	Normal
25"	Normal
26"	Lång

Modell/Sittbredd/ fastsättningsbredd*	PAWS bredd mittstycke	Klämmhållare	Breddelar
S2 och S3/33/33	200 mm standard	Standard	107 mm
S2 och S3/36/36	200 mm standard	Standard	107 mm
S2 och S3/39/39	200 mm standard	Standard	107 mm
S2 och S3/42/42	200 mm standard	Standard	150 mm
S2 och S3/45/45	200 mm standard	Standard	150 mm
S2 och S3/50/50	200 mm standard	Standard	190 mm
U2 och U3/33/22	150 mm smal	Standard klämhållare med vinklad hylsa	70 mm
U2 och U3/36/25	150 mm smal	Standard	70 mm
U2 och U3/39/28	150 mm smal	Standard	80 mm
U2 och U3/42/31	200 mm standard	Standard	107 mm
U2 och U3/45/34	200 mm standard	Standard	107 mm

REHASENSE SVERIGE
POLHEMSGATAN 28
SE-392 39 KALMAR, SWEDEN

+46 722 325 090
MATS.WIHLBACKA@REHASENSE.COM

Följ oss på sociala media



Rehasense's quality management complies with both the ISO 9001 and ISO 13485 standards, as confirmed by TÜV NORD.

Rehasense's medical devices are CE-marked and meet the requirements of EU Regulation 2017/745 (MDR).

Copyright Rehasense® 2022



VI-2022