

PAWS backspegel



Monteringsanvisning (SE)



Artikelnummer:

EBH01B



Monteringsanvisning



1. För montering behövs en 5mm och en 6 mm insexnyckel



2. Om det sitter ett stopp monterat i styret ska detta lossas med en 5 mm insexnyckel.



3. Dra ut stoppet ur styret.



4. För in backspegelns expanderfäste i styret.



5. Lås fast med 6 mm insexnyckel.



6. Justera in backspegeln genom att lossa de två skruvarna med en 5 mm insexnyckel. När spegeln sitter i rätt position drar vi fast dem. Spegeln kan därefter finjusteras genom att manuellt ändra vinkel i höjd- och sidled.