

SERVER HD

Quick guide (SE)




REHASENSE





1. Låsknappen och bärhandtag
2. Bromshandtag
3. Ratt för höjdställning av körhandtag
4. Väska med reflexdetaljer (tillbehör)

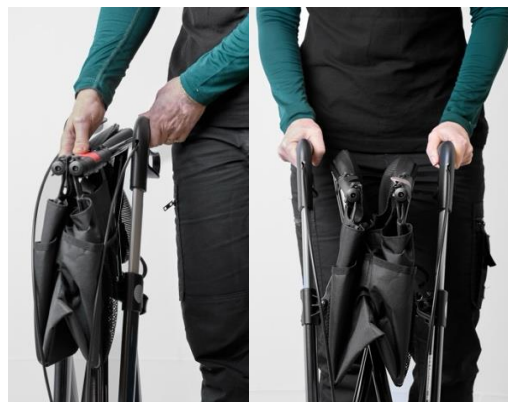

- Utfällning av SERVER HD rollatorn
1. Tryck på den röda låsknappen
 2. Fäll ut rollatorn genom att föra körhandtagen utåt



- Utfällning av SERVER HD rollatorn forts.
3. Pressa utsidorna av sitsen ner mot kryssdelen tills sitsen låses i ramen



- Höjdställning av SERVER HD körhandtag
1. Lossa rattan för höjdställning



- Höjdställning av SERVER HD handtag forts.
2. Ställ in handtaget i önskat läge genom att föra handtaget uppåt/neråt
 3. Använd markeringarna och hålbilderna för att säkerställa inställningen
 4. Dra åt rattan för höjdställningen




- Rekommenderad höjd på handtaget
- Handtaget bör ställas in i samma höjd som handleden hos brukaren, då denne står med lätt böjd armbåge.



Aktiv inbromsning

1. Krama bromshandtaget för att sakta ned och stanna rollatorn

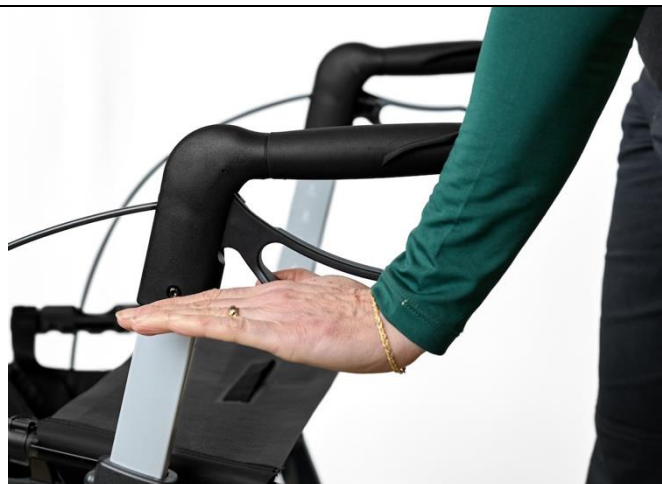


Parkeringsbroms

1. Pressa handtagen neråt tills de låser sig
2. Parkeringsbroms måste aktiveras om brukaren vill sätta sig på sitsen
3. Parkeringsbroms måste aktiveras vid uppresning till stående



Hoppfällning av SERVER HD

1. Lyft handtaget på sitsen rakt upp för att låsa upp rollatorn
2. För sidorna in mot varandra och pressa rören lätt ihop för att låsa rollatorn

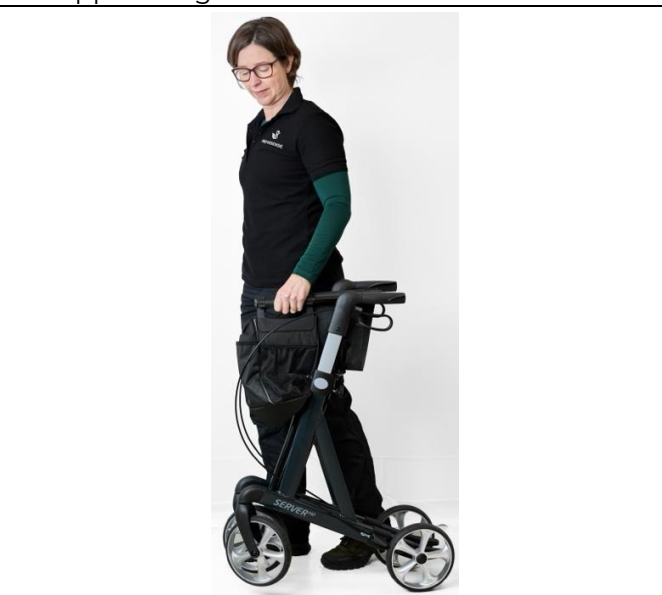

Att bära SERVER HD

1. Lyft rollatorn via handtaget för att lyfta framhjulen. Detta för att underlätta att gå i trappan och/eller rulla rollatorn längs marken