

# DRIVER



Bruksanvisning (SE)



CE

## 1 Allmän information

Bäste kund,

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av detta hjälpmedel inkl viktiga instruktioner för korrekt och säker användning av produkten. Det är viktigt att läsa denna bruksanvisning noggrant före användning.

REHASENSE utvecklar ständigt sina produkter och förbehåller sig rätten att ändra produkternas specifikationer och egenskaper utan föregående meddelande, om inte annat avtalats.

Vid frågor, vänligen kontakta din Rehasense Sverige direkt. Kontaktinformation finns på sista sidan i bruksanvisningen.

## 2 Avsedd användning, indikationer och kontraindikationer

Avsedd användning: Rollatorn är utformad för att hjälpa personer som har svårt att stå eller gå på egen hand. Sitsen kan användas. Andra användningsområden är inte tillåtna. Rollatorn är avsedd för inomhusbruk och utomhusbruk i miljöer där stabiliteten inte äventyras av underlaget.

Instruktioner: Rollatorn är avsedd speciellt för de personer som på grund av ett brett spektrum av behov behöver stöd under gång.

Rekommendation: En funktionsbedömning gjord av lämplig hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas före användning.

## 3 Leverans & allmän produkt beskrivning

Rollatorer levereras i kartonger och viks ihop för enklare transport.

Innehåll:

- ✓ 1 rollator, hopfäld
- ✓ 1 bruksanvisning

Rollatorn "DRIVER" en består av en pulverlackerad vikbar ram gjord av triangelrör i aluminium. DRIVER är lätt att manövrera samt stabil. Körhandtagen justeras enkelt i höjd. Rollatorn är utrustad med ett PU-säte och en stålkorg finns som tillbehör.

## 4 Säkerhetskrav

Se till att denna bruksanvisning har lästs av alla som hanterar rollatorn.



### OBS!

- Brukarvikten får inte överstiga 150 kg
- Rollatorväskan får inte belastas med mer än 10 kg
- Rollatorn lämpar sig bäst på plana, jämna ytor
- Rollatorn är inte avsedd att förflyttas på i en sittande position
- Bromsarna bör sättas i parkeringsläge före och efter bruk

**VIKTIGT!**

- Använd rollatorn endast för det ändamål den är avsedd för
- Använd rollatorn endast i gott tekniskt skick.
- Konstruktiva ändringar utan skriftligt tillstånd från leverantören är ej tillåtna
- Observera risk för klämning mellan rörliga delar
- Rollatorn ska användas på stabila ytor




Mind Your Fingers

Notera denna symbol på rollatorn och undvik inklämning när rollatorn fälls ihop, fälls ut eller justeras. Observera avståndet mellan rollatorns delar för att undvika att klämma fingrarna eller andra kroppsdelar.

VID ALLVARLIG INCIDENT/AVVIKELSE, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER REHASENSE DIREKT. Omedelbara åtgärderna bör vidtas i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/745 om medicintekniska produkter

## 5 Beskrivning

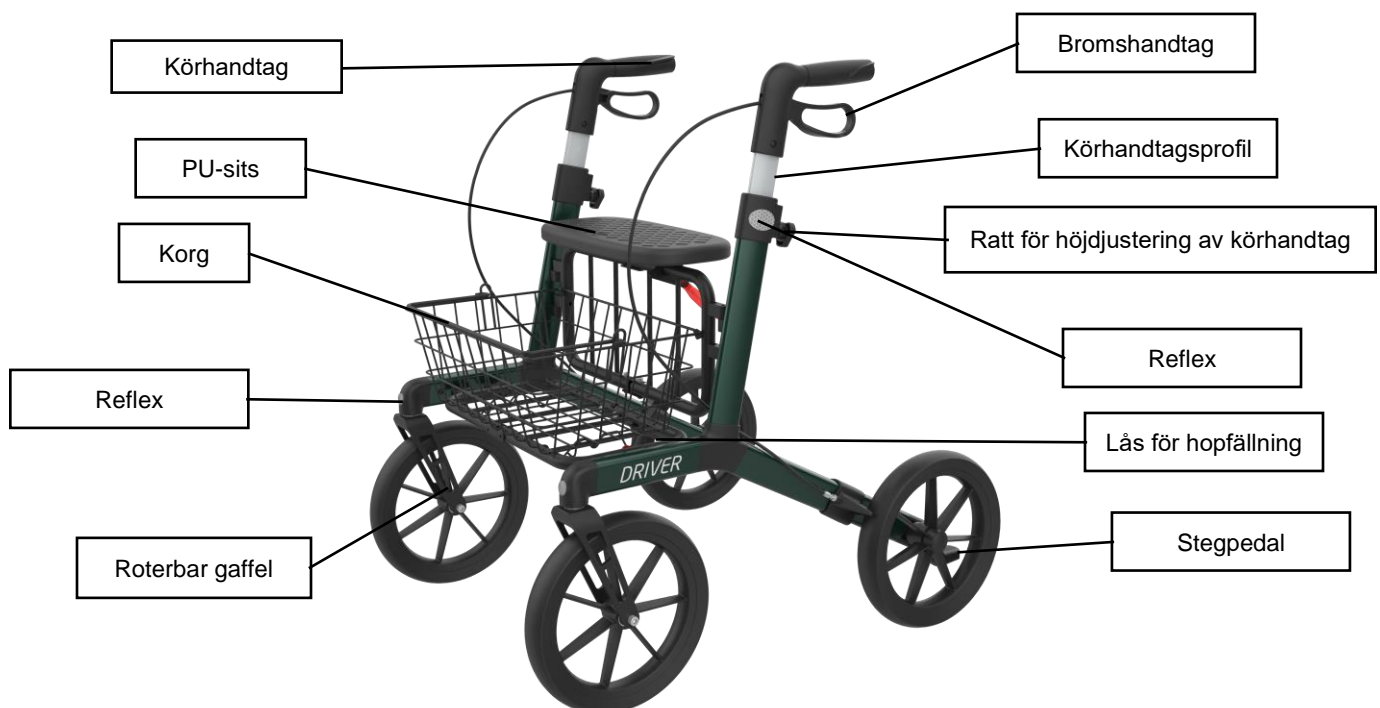

## 6 Användning

### Leveranskontroll

Efter att ha packat upp rollatorn, kontrollera att samtliga delar som visas på ritningen ovan finns (utom korg som tillhandahålls separat).

### Funktionskontroll

- Innan rollatorn tas i bruk, kontrollera att bultarna som håller fast hjulen är ordentligt fastsatta och att rollatorn är stabil
- Kontrollera bromsens funktion inkl parkeringsläge

### Utfällning av rollatorn

- Loss låsspaken i bilden till vänster moturs
- Dra isär handtagen så att sitsen roteras medurs
- Skjut sitsen framåt tills ett "klick"-ljud hörs
- Se bild till höger som visar rollatorn i ett låst läge



### Hoppfällning av rollatorn

- Dra plastringen på låsmekanismen för att låsa upp rollatorn
- Fäll ihop rollatorn genom att pressa handtagen inåt mot varandra
- Roter låsspaken medurs för att låsa rollatorn i hopfällt läge

### Höjjustering av körhandtag

- Lossa ratten under körhandtagsprofilen
- Ställ handtagen in på önskad höjd i något av de fasta lägen
- Dra åt ratten

### Bromsar

- Krama bromshandtaget (så att det rör sig uppåt mot körhandtaget) för att sakta ned/stanna rollatorn
- Släpp bromshandtaget för att frigöra bromsen
- Pressa bromshandtaget neråt tills det låser sig för att aktivera parkeringsbromsen
- Krama bromshandtaget lätt uppåt för att frigöra parkeringsbromsen



**Obs! Parkeringsbromsen bör aktiveras när rollatorn står still för att minska fallrisken samt undvika att den rullar bort**

### Sitsen

- Kontrollera att bromsarna är låsta före användning
- Sitt alltid med ryggen mot körriktningen



**Varning! Lås alltid bromsarna (parkeringsläge) innan och under användning av sitsen samt före uppresning från sitsen för att undvika fall**


## 7 Rengöring, desinfektion & underhåll

### Allmänt

- Rollatorn bör rengöras regelbundet/hålles i rent skick för bästa resultat
- Lättare smuts och damm kan avlägsnas med en fuktig trasa
- Hårdare smuts kan avlägsnas med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten
- Undvik slipmedel och/eller blekningsmedel
- Hjulen kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel
- Rollatorn tål att tvättas i tvätttunnel/duschkabinett/diskdesinfektor max 80° i 10min
- Rollatorn kan ytdesinficeras med en mjuk trasa eller svamp och ett desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi avråder från desinfektionsmedel som innehåller klor eller fenol.
- Kontrollera regelbundet att hår och annat inte samlar sig mellan hjulen och gafflarna
- Insmörjning av rörliga delar kan göras emellanåt för att underhålla hjulen

## 8 Etikett Exempel

Produktetiketten finns på ett av de nedre rören på huvudramen. Den innehåller följande information om produkten: namn, serienummer, tillverkningsdatum, artikelnummer, maximal brukarvikt, väskans maximala belastning, bredd, rollatorns storlek och information om tillverkaren. Ta aldrig bort etiketten från produkten.

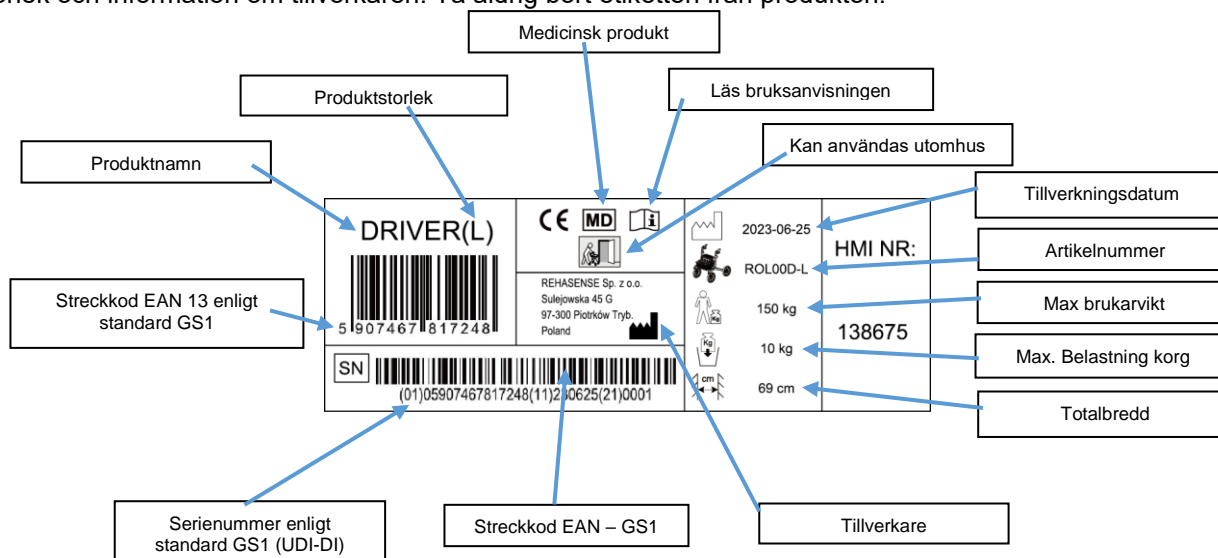

## 9 Teknisk data

<b>DRIVER rollator</b>	M	L
Max. brukarvikt	150 kg	
Max. belastning av stålkorgen	10 kg	
Totalvikt utan korg	9,7 kg	9,9 kg
Korgvikt	950 g	950 g
Total höjd hopfälld (lägst)	82 cm	82 cm
Totalbredd	67 cm	67 cm
Bredd hopfälld	25,8 cm	25,8 cm
Sitsbredd	46 cm	46 cm
Höjd på handtag (justerbar)	78-91 cm	82-96,5 cm
Sitthöjd	62 cm	
Bromsar	Enhandsbroms med parkeringsfunktion	
Hjul (diameter x bredd)	Svart PU-däck 285 x 44 mm	

## 10 Allmän felsökning

<i>Problembeskrivning</i>	<i>Möjliga orsaker</i>	<i>Lösning</i>
Svårigheter att skjuta eller styra rollatorn	Det finns smuts mellan hjulen och gafflarna	Rengör mellan hjul och gaffel. Ta bort hjulet vid behov. Smörj rörliga delar med smörjolja.
Bromsarna fungerar inte som de ska eller olika på var sin sida.	Bromsbackarna är slitna eller bromsarna är inte korrekt justerade.	Prova att justera bromsvajern eller byt ut bromsbackarna. Om detta inte löser problemet, kontakta återförsäljaren.
Ramen låses inte korrekt vid hop- och/eller utfällning	Kontrollera om modellens låsmekanism eller mottagande del inte slitits ur eller är defekt. Kontrollera även att ramen inte är skev.	Byt ut slitna eller defekta delar. Om detta inte löser problemet, kontakta återförsäljaren.

## 11 Transportråd

Rollatorn är lätt att fälla ihop och lätt att transportera. Det rekommenderas att fälla ihop den enligt ovan i bruksanvisningen. Rollatorn bör transporteras på ett sådant sätt att den inte rör sig plötsligt under transporten.

## 12 Rekonditionering och kassation

Rollatorn kan återanvändas. Innan rollatorn lämnas vidare till en annan person ska den kontrolleras av kvalificerad personal.

### Funktionskontroll vid rekonditionering

- Visuell inspektion av ramen
- Kontrollera samtliga muttrar, bultar och rörliga delar
- Kontrollera plastkomponenters skick
- Kontrollera hjul, gafflar och kullager
- Kontrollera bromsfunktion och skick

Skadade/trasiga komponenter ska bytas ut. Det rekommenderas att hjulen byts ut när behovet uppstår. Produkten måste rengöras och desinficeras noggrant före återanvändning.



**Obs!** En rollator med böjd/skev ram ska kasseras

### Kassation

När produkten inte längre kan användas ska den, dess tillbehör och förpackningsmaterial sorteras på rätt sätt. Rollatorn ska lämnas till en deponerings-/avfallsstation för återvinning

## 13 Garanti

- Rollatorn garanteras mot tillverkningsfel är 2 år från leveransdatum om inte annat avtalats
- Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning och/eller normalt slitage
- Instruktionerna för underhåll och användning måste följas
- Otillåten modifiering av produkten kommer att resultera i att garantin upphör att gälla

## 14 Förväntad livslängd

Produktens förväntade livslängd är tio (10) år om den används i enlighet med bruksanvisningen inkl underhåll och instruktionerna för korrekt användning. Produktens faktiska livslängd kan variera beroende på hur mycket och hur intensivt den används.

Om tekniska problem uppstår, kontakta din återförsäljare. Du kan också kontakta Rehasense® direkt.

## Rehasense®

Tillverkare  
Rehasense SP. SOO.  
Sulejowska 45g  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Polen

[www.rehasensesverige.se](http://www.rehasensesverige.se)  
[info@rehasense.com](mailto:info@rehasense.com)

Rehasense Sverige  
Polhemsgatan 28  
39239 KALMAR  
Sweden



REHASENSE