

ICON 60

**Manuell rullstol
för aktiv rehabilitering
Rekonditioneringsanvisning
Gäller från 2023 01 01**



REHASENSE



Rengöring och desinficering

Ramen

Ramen ska rengöras med en fuktad trasa, eventuellt med mild rengöringsmedel. Den ska sedan torkas av med en torr trasa. Ramen ska kontrolleras regelbundet för att upptäcka eventuella färgdefekter som kan orsaka korrosion. Vid synliga ramdefekter (sprickor, färgdefekter osv.) ska du höra med den lokala försäljaren angående diagnostik och underhåll.

Klädsel

Sätet och ryggstödet är tillverkade av väldigt slitåligt och förstärkt nylon och andningsaktivt spacertyg. Du kan enkelt montera ned sätets klädsel genom att dra av kardborrebanden och ta av den från ramens rör. Sätet och ryggstödet klädsel kan tvättas med en svamp och mild rengöringsmedel eller i tvättmaskin vid 60°C.

Smuts på metall- och plastdelarna kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller en mjuk trasa. Läs igenom produktinformationen och använd endast rengöringsmedel som är avsedda för rengöring och desinficering (använd inte lösnings-, eller slipmedel).

Desinficering

Kontakta försäljaren för att kontrollera att desinficeringen har utförts av kompetent personal. För att desinficera produkten själv får du använda allmänt tillgängliga desinficeringsmedel utan klor och fenol. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som uppstått i samband med felaktig användning av desinfektionsmedel.

Återanvändning

Vår medicinska utrustning kan användas av en annan användare om den ursprungliga användaren inte längre behöver den. Utrustningen ska först kontrolleras noggrant och desinficeras av en auktoriserad tekniker hos försäljaren.

Så här förbereder du rullstolen för en ny användare:

- kontrollera rullstolens utseende och tekniska tillstånd: kontrollera alla mekanismer och justeringsområden, kontrollera ramens skick (sprickor, förslitning),
- rengör enligt rekommendationerna i bruksanvisningen,
- vid behov byt ut hjul- och/eller klädselelement,
- anpassa och justera till användarens behov.

Återvinning och avfallshantering

Rullstolen ska återvinnas enligt gällande lokala och statliga föreskrifter. Kontakta en lokal återvinningsstation eller en auktoriserad försäljare för att få information om korrekt återvinning av förpackningar, metallramens element, plast- och tygelement.

Vid tekniska frågor vänligen kontakta en lokal rullstolsdistributör eller Rehasense.

Leverantör: